


HURTIGGUIDE for pasient



AVBRYT INFUSJONEN

- Trykk på  og hold inne.
- Trykk på Infusjon avsluttet og hold inne. Bekreft med grønn hake.
- Stempelstangen dras tilbake.
- Koble fra ampullen ved å vri den en kvart gang mot venstre (mot klokken).
- Trykk så på > knappen.
- Ta ut batteriet og sett det på lading. Sett i et oppladet batteri.

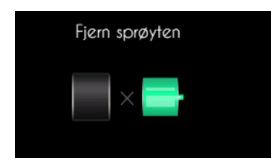

STARTE NY INFUSJON

- Trekk opp legemiddel etter bruksanvisning og sett en ny nål på et passende sted.
- Slå på pumpen.
- Trykk på Ny infusjon.
- Trykk flere ganger på > knappen til du hører en drende lyd (pumpen forberedes for infusjon).
- Sett ampullen på pumpen og trykk på > knappen.
- Fest slangen til ampullen og fyll slangen ved å trykke på  knappen og hold den inne til du ser at det kommer legemiddel ut av slangen. Trykk så på > knappen.
- Start infusjonen ved å trykke på .



TA EN BOLUSDOSE

- Trykk på  og hold inne.

PAUSE INFUSJONEN

- Trykk på  og hold inne.
- Trykk så på Pause og hold inne.

STARTE INFUSJONEN

- Trykk på  og hold inne.
- Trykk på Gjenoppta infusjon og hold inne.

Følgende hurtigguide er ikke et alternativ til informasjonen i manualen, men bare en kort sammenfatning av pumpens grunnleggende funksjoner.