

Guide ACTPen® steg för steg

Använda ACTPen®

Det kan kännas nervöst de första gångerna du ska ge dig själv eller den person du vårdar en injektion med RoACTEMRA. Den förfyllda pennan är designad för att underlätta injektionerna. De steg som beskrivs i den här broschyren hjälper dig. När du har lärt dig stegen kommer du att känna dig säkrare.



Förberedelser


1. Du kommer att behöva:
 - en RoACTEMRA ACTPen, rumstempererad
 - en väl upplyst, ren, plan yta
 - sticksäker behållare
 - spritsudd
 - steril bomullstuss eller gasväv
 - klocka/timer
2. Kasta sprutan och använd en annan om:
 - utgångsdatum har passerats
 - vätskan är grumlig, missfärgad eller innehåller partiklar
 - sprutan är skadad

Det är viktigt att du försäkrar dig om att det är säkert att använda sprutan och läkemedlet.

3. Vänta i 45 minuter tills pennan är rumstempererad. Om vätskan i injektionspennan inte uppnått rumstemperatur kan injektionen bli obehaglig och ta längre tid.
4. Tvätta händerna med tvål och vatten.
5. Välj ett injektionsställe på magen eller låren och tvätta med en spritsudd.

Guide ACTPen steg för steg


1

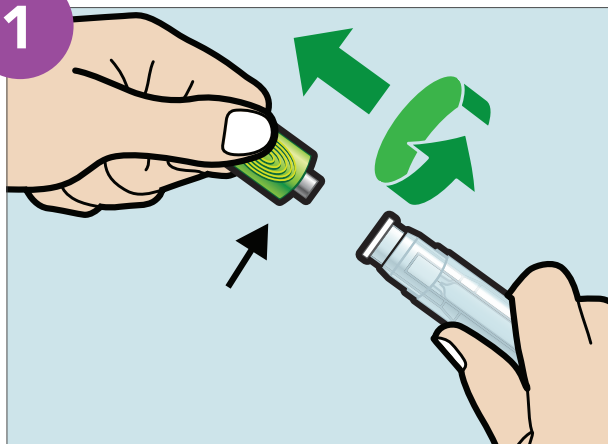

Vrid och dra av den gröna locket. ActPen ska användas inom 3 minuter annars kan innehållet torka i nålen.


Sätt aldrig tillbaka locket efter att det tagits bort då det kan skada eller böja nålen.

2

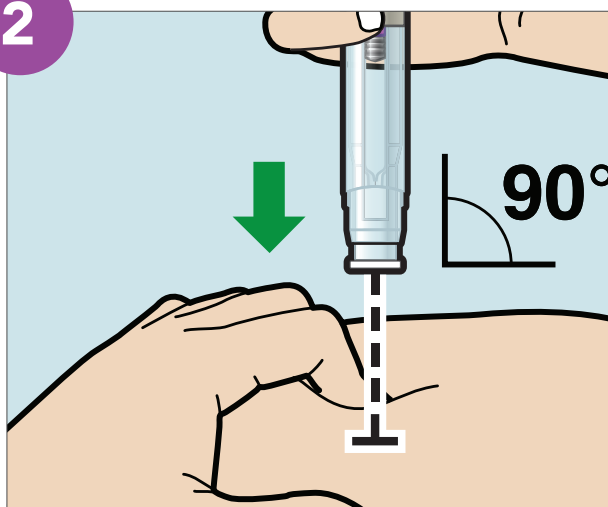


Nyp tag i huden i det rengjorda området för att förbereda ett fast injektionsställe. Placera injektionspennans nålskydd mot hudvecket i en rät vinkel (90°).

3

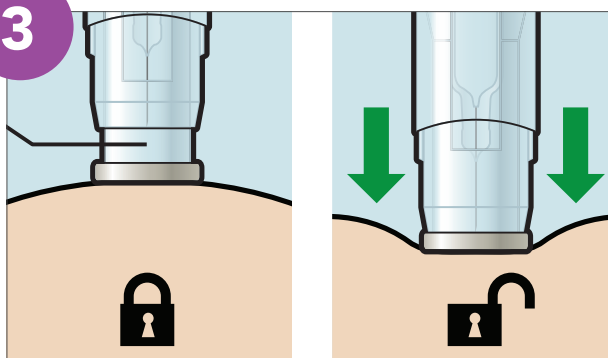


Tryck ned ACTPen tills nålskyddet är helt intryckt. OBS! Om nålskyddet inte är helt inskjutet fungerar inte aktiveringsknappen.

4

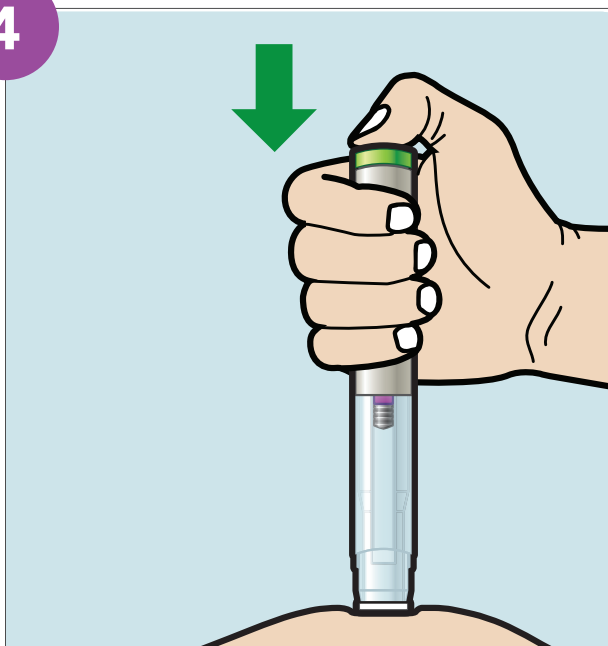


Tryck ovanpå den gröna aktiveringsknappen. Ett klickljud indikerar injektionsstart.

5

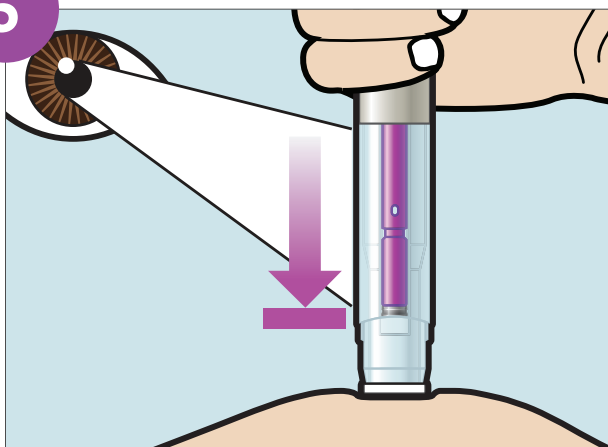

Håll knappen intryckt och håll ACTPen på plats tills den lila indikatorn har slutat röra sig. Det kan ta upp till 10 sekunder, men det tar normalt bara 3-4 sekunder.

6

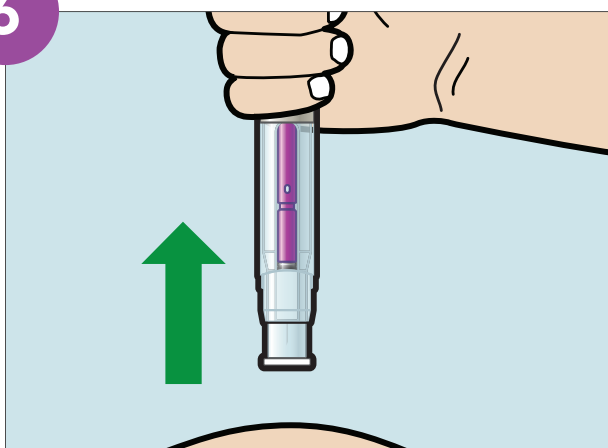

Lyft ACTPen rakt upp från huden och släpp av aktiveringsknappen. Nålskyddet skyddar och täcker nålen.

Tips

- Det gröna locket innehåller en löst sittande metallcylinder och det är alltså normalt
- Lägg ACTPen på ett säkert ställe i väntan på att den ska uppnå rumstemperatur. Glöm inte att ta tid.
- Håll ACTPen så att du kan se den lila indikatorn röra sig under injektionen och håll pennan stadigt mot huden under hela injektionen.
- Kontrollera efter injektionen att den lila indikatorn helt fyller det genomskinliga fönstret - om inte: kontakta sjukvårdspersonal.