

QUICKGUIDE

SO[♥]CONNECT+ infusionspumpe

Denne QUICKGUIDE erstatter ikke informationen samt uddannelsen som du får af sundhedspersonalet



1 VASK HÆNDERNE
og find en ren flade som du kan bruge til at forberede infusionen.



2 TAG PUMPEN OG TILBEHØRET FREM
Åben forpakningerne med lægemiddel, sprøjte, infusionssæt samt tilbehøret.



3 AFSPRIT GUMMIMEMBRANEN
på lægemidlet¹.



4 STIK MINI-SPIKEN

gennem gummimembranen på lægemidlet.



5 FORBERED² SO♥FILL-SPRØJTEN

og skru sprøjten på Mini-Spiken.

Træk langsomt lægemidlet op SO♥FILL sprøjten.


Følg altid din læges ordination.



6 KLARGØR SPRØJTEN, OG INFUSIONSÆT

ved at skru infusionsættet fast på sprøjten.

Forfyld infusionssættet ifølge sundhedspersonalet's instruktion.

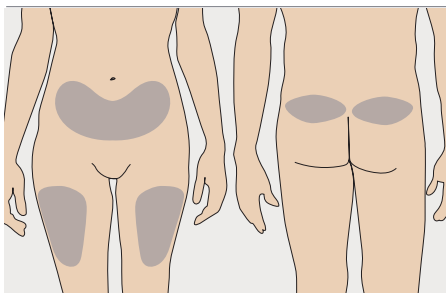

7 VÆLG RETTE INFUSIONSSTED

Se markeringerne på billede³.




Eks. neria™ multi



Eks. neria™ guard

8 AFSPRIT INDSTIKSSTEDET

Tag et let greb i huden og placere infusionssættet i 90 graders vinkel direkte ned i huden.^{3, 4}

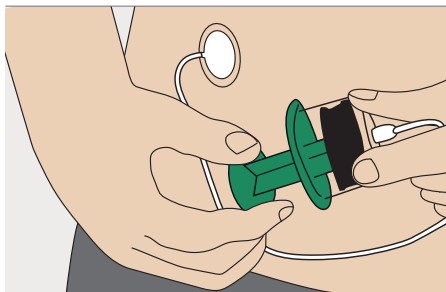

9 SIKKERHEDSKONTROLL

Når du anlægger infusionssættet, skal du sørge for, at du ikke har ramt et blodkar.



a) Aspirer, træk stemplet tilbage.

Se om der er blod i slangen nærmest nålen.

b) Løsne derefter sprøjten fra infusionssættet i 10-15 sekunder. Tjek om der kommer blod i slangen nærmest nålen.

c) Når sikkerhedskontrollen er afsluttet, skrues infusionssættet tilbage på sprøjten.

Hvis der kommer blod, har du ved et uheld ramt et blodkar. Træk nålen ud, og kassér infusionssættet. Gentag proceduren i henhold til afsnit 6-8 med et nyt infusionssæt, og nyt indstikssted. Foretag ny sikkerhedskontrol⁴ i følge afsnit 9.

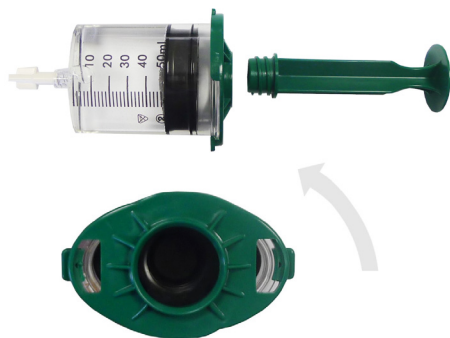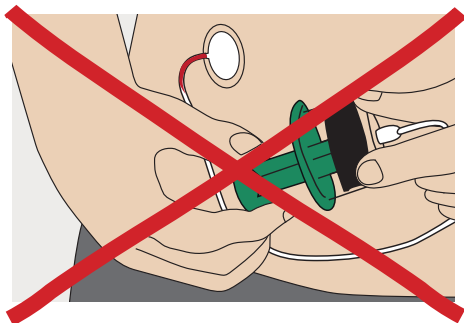

10 SKRU STEMPELSTANGEN UD

af sprøjten mod uret, og lad den grønne stempelstopkrave sidde på sprøjten, indtil stempelstangen er helt ude. Derefter fjernes stempelstopkraven fra sprøjten ved at dreje den mod uret.²


Vent med at tilslutte sprøjten til pumpen. Det forekommer ikke før trin **12 E**.

11 START PUMPEN PÅ ON/OFF KNAPPEN I BUNDEN

Pumpen starter op med selvcheck og kører automatisk pumpestangen til rette position.




12 START INFUSIONEN

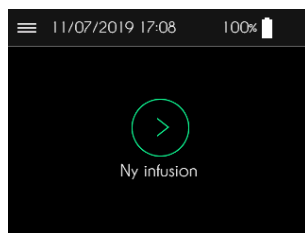


A: TRYK PÅ "START NY INFUSION"
Kontrollere infusionens indstillinger.




B: SPRØJTESTØRRELSE, LÆGEMIDDELVOLUMEN
og antal instiksstedet
Bekræft på den hvide pil fremad.

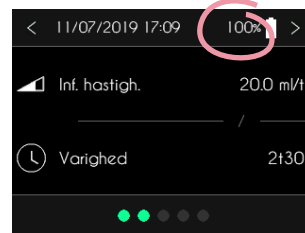


C: INFUSIONS- HASTIGHED OG INFUSIONSTID VISES
Bekræft på den hvide pil fremad.

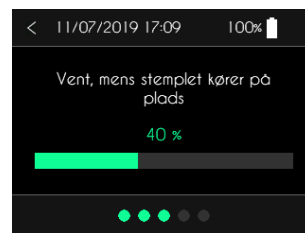

D: PUMPESTANGEN KØRER FREM TIL RETTE POSITION

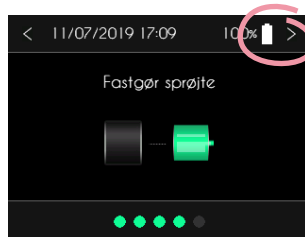

E: TILSLUT SO♥FILL-SPRØJTEN²
diagonalt til pumpen.
Drej sprøjten med uret indtil sprøjten klikker på plads. Bekræft med hvid pil fremad.

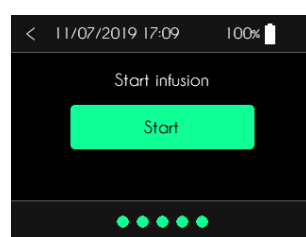


F: START PUMPEN VED AT TRYKKE PÅ "START"



Nu er infusionen igang.
Hvis du har brug for teknisk support, kontakt **Nordisk Infucare +45 70 28 10 24**

13 AFSLUTNING AF INFUSION

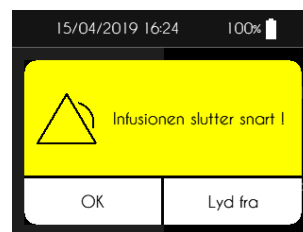

A: INFUSIONEN AFSLUTTES SNART
Et akustisk signal forekommer.
Bekræft med OK i 2 sek.



B: INFUSIONEN ER AFSLUTTET
Et akustisk signal forekommer. Bekræft med OK i 2 sek. Lad sprøjten være på plads, indtil stempelstangen er helt trukket tilbage.

C: FJERN SPRØJTEN FRA PUMPEN

Drej også sprøjten mod uret træk lige op. Bortskaf plast og stikkende materiale i henhold til den medicinske instruktion.

Læs altid pumpens brugsanvisning for mere vigtig information.

DANMARK: Industrivej 21 • 4000 ROSKILDE • +45 70 28 10 24 • info@infucare.dk
FINLAND: Tekniikantie 14 • 02150 ESPOO • +358 207 348 760 • info@infucare.fi
NORGE: Gaustadalléen 21 • 0349 OSLO • +47 22 20 60 00 • info@infucare.no
SVERIGE: Gustavslundsvägen 12, 3 tr • 167 14 BROMMA • +46 (0)8 601 2440 • info@infucare.se

nordic
INFUCARE