

PIKAOPAS

SO[♥]CONNECT+ infuusiopumppu

Pikaopas ei korvaa terveydenhoitohenkilökunnan antamaa tietoa ja ohjeistusta



1 PESE KÄDET
ja valitse puhdas taso.



2 OTA ESIIN PUMPPU JA TARVIKKEET
Avaa lääkkeen, ruiskun, infuusiosetin ja tarvikkeiden pakkaukset.



3 PYYHI LÄÄKEAMPULLIN KUMIKALVO¹



4 PISTÄ MINI-SPIKE -NEULA

kumikalvon läpi.



5 VALMISTELE² SO♥FILL -RUISKU

ja kierrä se kiinni Mini-Spike:iin.


Vedä lääke hitaasti SO♥FILL -ruiskuun.

Noudata aina lääkärin määräämää annostusta.



6 KIERRÄ INFUUSIOSETTI KIINNI

Esitäytä infuusiosetti terveydenhoitohenkilökunnan ohjeiden mukaan.

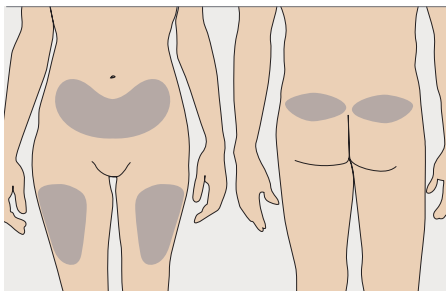

7 VALITSE OIKEA INFUUSIOKOHTA

Katso kuvasta merkityt kohdat.³




Ex. neria™ multi



Ex. neria™ guard

8 OTA INFUUSIOSETTI KÄTEEN

Ota kevyt nipistysote ihonalaisesta rasvakudoksesta ja pistä suoraan 90 asteen kulmassa.^{3, 4}

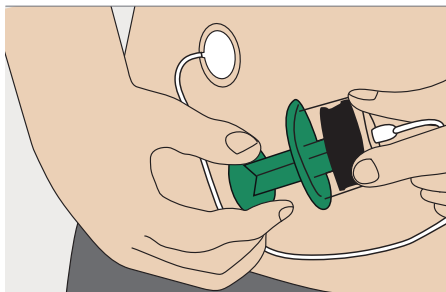

9 TURVATARKASTUS

Tarkista infuusiosetin kiinnittämisen jälkeen, että et ole pistänyt verisuoneen.



a) Vedä ruiskun mäntää taaksepäin.

Tarkista, tuleeko letkuun verta lähellä neulaa.

b) Irrota sen jälkeen ruisku infuusiosetistä 10–15 sekunniksi. Tarkista myös tässä vaiheessa, tuleeko letkuun verta lähellä neulaa.

c) Kun olet tehnyt turvatarkastuksen, kierrä ruisku takaisin kiinni infuusiosettiin.

Jos letkussa näkyy verta, olet vahingossa pistänyt verisuoneen. Vedä neula ulos, hävitä se ja toista kohdat 6–8 uudella infuusiosetillä ja uudella pistokohdalla. Tee lopuksi turvatarkastus⁴ uudelleen kohdan 9 mukaisesti.

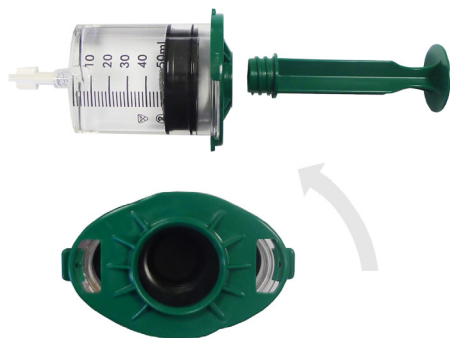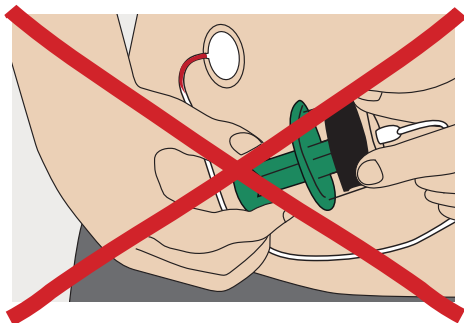

10 IRROTA MÄNTÄ

ruiskusta kiertämällä sitä vastapäivään. Vihreän männänrajoittimen tulee aina olla ruiskussa kiinni siihen asti, kunnes mäntä on irrotettu. Irrota sen jälkeen männänrajoitin ruiskusta kiertämällä sitä vastapäivään.²


Älä kiinnitä ruiskua vielä pumppuun. Se tehdään vasta vaiheessa 12 E.



11 KÄYNNISTÄ PUMPPU POHJASSA OLEVASTA ON/OFF-KYTKIMESTÄ


Pumppu suorittaa testin automaattisesti ja asettaa männän oikeaan asentoon.

12 ALOITA INFUUSIO

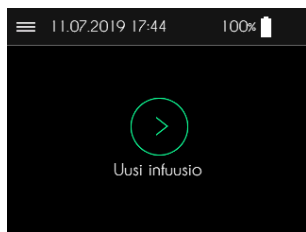


A: PAINA "ALOITA UUSI INFUUSIO"

Tarkista infuusion asetukset.

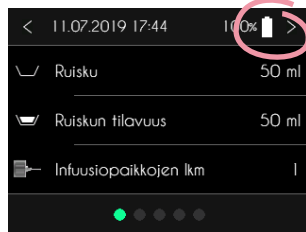

B: RUISKUN KOKO, LÄÄKKEEN MÄÄRÄ

Ja pistokohtien määrä näkyvät ruudulla. Vahvasta painamalla valkoista eteenpäin nuolta.

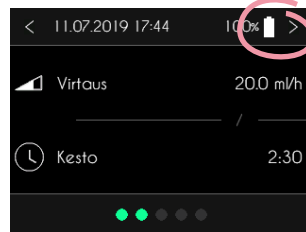


C: INFUUSIONOPEUS JA INFUUSIOAIKA NÄKYVÄT RUUDULLA

Vahvasta painamalla valkoista eteenpäin nuolta.



D: MÄNTÄ SIIRTYY OIKEAAN ASEENTOON

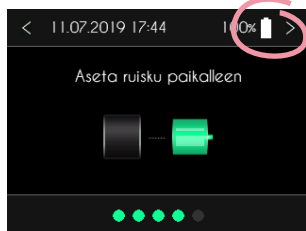

E: KIINNITÄ SO♥FILL -RUISKU²

viistosti pumppuun. Kierrä ruiskua myötäpäivään, kunnes se napsahtaa kiinni. Vahvasta painamalla valkoista eteenpäin nuolta.




F: ALOITA INFUUSIO PAINAMALLA "ALOITA"



Nyt infuusio on käynnissä.

Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteyttä
Nordic Infucare
0207 348 760

13 INFUUSIO LOPPUU

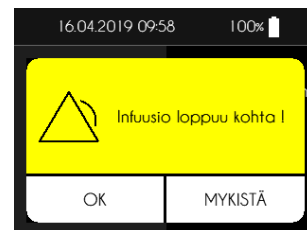

A: INFUUSIO PÄÄTTYY PIAN

Äänimerkki kuuluu. Vahvasta painamalla OK 2 sekunnin ajan.



B: INFUUSIO PÄÄTTYNYT

Äänimerkki kuuluu. Vahvasta painamalla OK 2 sekunnin ajan. Anna ruiskun olla paikoillaan, kunnes mäntä on vetäytynyt kokonaan taakse.

E: IRROTA RUISKU PUMPUSTA

Kierrä ruiskua vastapäivään ja vedä suoraan ylöspäin. Hävitä muovimateriaalit ja neulat terveydenhoitohenkilökunnan ohjeiden mukaan.

Lue aina pumpun käyttöohje, koska se sisältää tarkemmat tiedot pumpun käytöstä.

TANSKA: Industrivej 21 • 4000 Roskilde • +45 70 28 10 24 • info@infucare.dk
SUOMI: Tekniikantie 14 • 02150 ESPOO • +358 207 348 760 • info@infucare.fi
NORJA: Gaustadalléen 21 • 0349 OSLO • +47 22 20 60 00 • info@infucare.no
RUOTSI: Gustavslundsvägen 12, 3 tr • 167 14 BROMMA • +46 (0)8 601 2440 • info@infucare.se

nordic
INFUcare