


D-mine[®]-pumppu

Pikaohje potilaille



Lääkeinfuusion aloittaminen

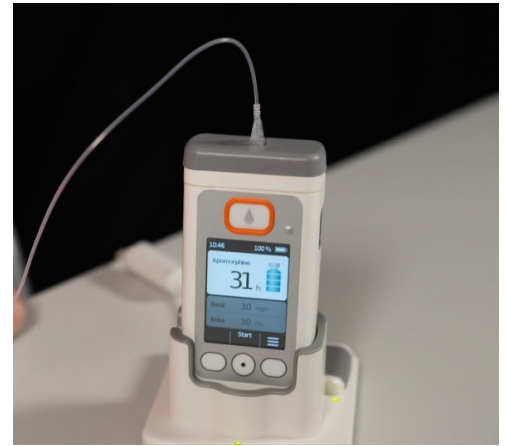

- Valmistele lääke erillisen ohjeen mukaan ja pistä infuusioneula sopivaan kohtaan ihossa.
- Paina päänäytön **Aloitus**-painiketta. Pidä painiketta pohjassa (noin 3 sekuntia), kunnes kuulet merkkiään. Päästä painikkeesta irti vasta sitten.


Lääkeinfuusion lopettaminen



- Paina päänäytön **Lopetus**-painiketta. Pidä painiketta pohjassa (noin 3 sekuntia), kunnes kuulet merkkiään. Päästä painikkeesta irti vasta sitten.

Jos säiliö on tyhjä tai melkein tyhjä, toimi seuraavien kohtien 1, 2 ja 3 mukaisesti.

Jos säiliössä on vielä lääkettä, ja aiot käyttää sitä seuraavana päivänä, irrota pumppu itsestäsi ja toimi kohdan 3 mukaisesti.

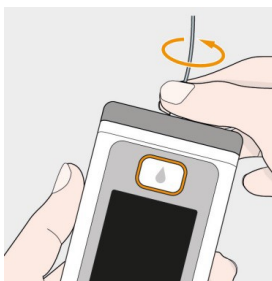


1. Irrota käytetty infuusiosarja itsestäsi ja säiliöstä.




2. Paina säiliön vapautuspainiketta ja vedä käytetty säiliö pois laitteesta. Hävitä se määräysten mukaisesti.
3. Kiinnitä pumppu latausasemaan. Laitteen näytön valo syttyy, ja kuuluu äänimerkki, joka ilmoittaa, että pumpun akkua ladataan. Näytössä näkyy muuttuva akkukuvake, ja latausaseman merkkivalo palaa keltaisena. Muista käyttää laitteen kahta akkua vuorotellen.

Lisäannoksen antaminen

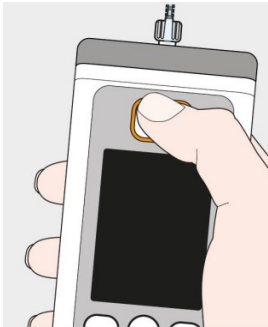

Paina lisäannospainiketta.

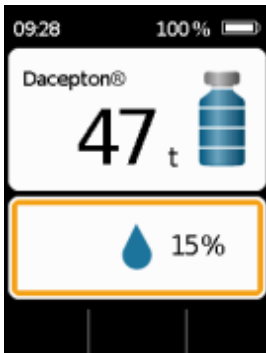

Pidä sitä pohjassa (noin 3 sekuntia), kunnes kuulet OK-äänimerkin. Päästä painikkeesta irti. Pumppu ruiskuttaa nyt asetusten mukaisen lisäannoksen. Pumppu näyttää infuusion antamisen tilanteen prosentteina.



Pumppu ilmoittaa lisäannoksen annetuksi, kun näytössä lukee 100 % ja kuuluu valmis-merkkiäni. Palaa päänäyttöön painamalla valintamerkkiä.

Pikaohje ei korvaa käyttöohjekirjan tietoja, vaan se on ainoastaan lyhyt perustason yhteenveto pumpun toiminnoista.