

## QUICKGUIDE til patienter




### AFSLUT INFUSIONEN

- Tryk på  og hold inde.
- Tryk på Infusion afsluttet og hold inde. Bekræft valget med det grønne "flueben"
- Stemplet kører tilbage.
- Fjern sprøjten ved at vride den en kvart omgang mod uret.
- Tryk herefter på > knappen.
- Tag batteriet ud og sæt det til opladning. Sæt det nyopladede batteri i pumpen.



### START NY INFUSION


- Træk medicinen op efter særskilt instruktion og sæt infusionsnålen på huden et passende sted.
- Tænd pumpen på knappen i bunden.
- Tryk på Ny infusion.
- Tryk flere gange på > knappen til du hører en snurrende lyd (pumpen gør klar til infusion).
- Sæt sprøjten på ved at dreje den en kvart omgang med uret. Tryk på > knappen.
- Udluftning af slange (priming) gøres ved at trykke på  knappen og holde den inde indtil du ser at der kommer medicin ud af slangen. Tryk herefter på > knappen.
- Start infusionen ved at trykke på **Start**.



## TAG EN BOLUSDOSIS

- Tryk på  og hold inde.

## PAUSERE INFUSIONEN

- Tryk på  og hold inde.
- Tryk på Pause og hold inde. Den grønne cirkel vil så blinke gult af og til.
- Efter 5 min. Vil der lyde en alarm "infusion på pause". Den skal du bekræfte med OK, for at der ikke kommer yderligere alarm for at pumpen er på pause.

## START INFUSIONEN

- Tryk på  og hold inde.
- Tryk på Fortsæt infusion og hold inde.

Følgende sammenfatning er ikke et alternativ til informationen i brugsansvisningen, men en kort grundlæggende sammenfatning af pumpens funktioner