



VORTEX®


وصف موجز

إرشادات الاستخدام (للاستعمال المنزلي)

اقرأ هذا الدليل بالكامل بعناية قبل استخدام VORTEX®



1 قبل كل استخدام، افحص VORTEX® بحثاً عن أي تلف وتأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة بداخله.

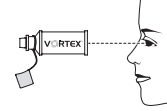


2 أزل غطاء منع التسرب من البخاخة / جهاز MDI (= بخاخة ذات جرعات محددة).
رج البخاخة جيداً. اتبع إرشادات التشغيل عند استخدام البخاخة.



3 ركب الجزء المخصص للغم في البخاخة في حلقة التوصيل بجهاز VORTEX®.
أزل الغطاء الواقي.




4 ضع الجزء المخصص للغم بين أسنانك وأطبق شفطيك حوله.
أو ضع القناع المركب بجهاز VORTEX® على وجهك برفق.
يجب أن يغطي ذلك الفم والأنف.

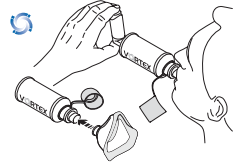

5 استخدام VORTEX® مع الجزء المخصص للغم

اضغط على الدواء وخذ نفساً عميقاً ببطء.
احبس نفسك لفترة إن كان ممكناً.
تنفّس ببطء في الجزء المخصص في الجهاز.
تأكد من بخ جرعة واحدة فقط في VORTEX® في كل مرة.

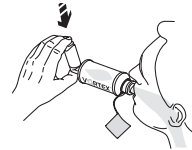

6 استخدام VORTEX® مع القناع

تأكد من تركيب القناع على الوجه بشكل محكم.
تنفّس ببطء في الجهاز.
بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٨ شهراً، ضع القناع على وجوههم بشكل محكم حتى التنفّس ٤-٦ مرات، أما الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ شهراً؛ فيجب تنفّسهم ٢-٤ مرات.
بالنسبة للأطفال الرضع والأطفال الصغار الذين يقومون بالاستنشاق عبر القناع، يوصى باستخدام بخاخة ذات جرعات محددة قبل وضع القناع على وجوههم مباشرة.



٧ عندما يلزم أخذ أكثر من جرعة واحدة

انتظر فترة وجيزة، ثم كرر الخطوات ٤ و ٥ (أو الخطوة ٦) من الإرشادات.






VORTEX®

وصف موجز

التنظيف

يجب تنظيف VORTEX® تمامًا قبل استخدامه لأول مرة.
في حالة ظهور أي تلوث، يجب تنظيف VORTEX® فورًا.
يمكن تنظيف VORTEX® بالطريقة التالية (انظر الشكل ٨-١٣)

٨ أزل حلقة التوصيل والقناع (إن توفر ذلك).
لا تُزل الجزء المخصص للفم والغطاء الواقي.

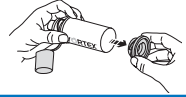

٩ نظّف جميع الأجزاء تمامًا باستخدام ماء صنبور دافئ وسائل تنظيف الأطباق.



١٠ اشطف جميع الأجزاء تمامًا تحت ماء نظيف جارٍ ثم قم بهزها لإزالة الماء الزائد.




التعقيم

١١ في ماء مغلي - الطريقة الموصى بها
ضع الملحقات وأجزاء VORTEX® المنفصلة
(القناع مثلاً) في ماء مغلي لمدة ٥ دقائق على الأقل.
استخدم حاوية نظيفة وماء شرب نقي، وتأكد من وجود قدر كافٍ من الماء بها.



١٢ مع جهاز التبخير أو التعقيم. يجب التعقيم لمدة ١٥ دقيقة على الأقل. الرجاء اتباع إرشادات الاستخدام ذات الصلة بجهاز التعقيم المستخدم.

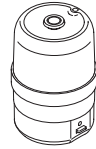

التجفيف

١٣ يجب تجفيف VORTEX® والملحقات تمامًا.
ونظرًا للتمتع بخصائص مضادة للكهرباء الساكنة، يمكن أيضًا التجفيف باستخدام منشفة نظيفة.



الموزع: Active Care Sverup AB

Uggledalsvägen 47 · 427 40 Billdal

الهاتف: ٠٣٨-٩١٧٥٢٥ · الفاكس: ٠٣٨-٩١٧٥٠٥

البريد الإلكتروني: info@activecare.se

موقع الويب: www.activecare.se

