


RÖNTGENKONTROLL AV INTESTINALSONDENS LÄGE

Duodopa är en behandling vid Parkinsons sjukdom. Duodopa administreras intestinallyt med hjälp av en pump och en kombination av PEG- och intestinalsond. Intestinalsondens spets ska helst ligga i proximala jejunum (dvs helst distalt om ligament Treitz). Byte av intestinalsond och justering av sondspetsens läge kan göras i röntgengenomlysning. För ytterligare information, se sondsystemets bruksanvisningar.

Utrustning



w/w adapter eller trevägskran, spruta, kontrastmedel och dricksvatten.

Vissa system har Y-koppling. Y-kopplingens sidoport, helvit och märkt **g**, mynnar i ventrikeln. Intestinalsondens port där kontrastmedlet injiceras är grön-vit och märkt **i**.

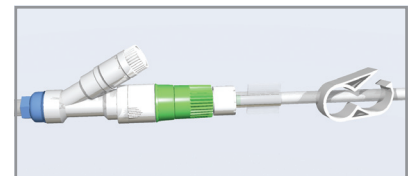

Injicera kontrastmedel och spola igenom intestinalsonden

1. Anslut en w/w adapter (**A**) eller trevägskran (**B**) mellan intestinalsondens port och sprutan (helst 20 ml).
2. Injicera kontrastmedel. Intestinalsonden rymmer ca 3 ml.
Det är normalt att de första millilitrarna går trögt att injicera, men sedan minskar motståndet.
3. Verifiera sondläget.
4. Efter genomförd röntgen spolas 40 ml dricksvatten i intestinalsondens port.

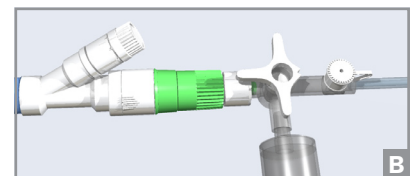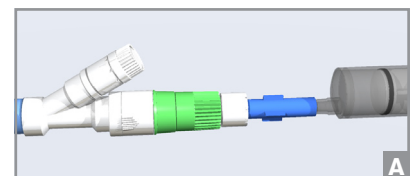

OBS! Intestinalsondens spets har sidohål. lakttag försiktighet vid justering av befintlig sond med hjälp av ledare, så att inte ledaren skadar tarmen.

Duodopa Support: 020-506050