


# SNABBGUIDE FÖR ATT PROGRAMMERA MORGONDOS INOM AKTIVERAD SPÄRRITID

## A. Programmera morgondos inom aktiverad spärrtid

Pumpen måste vara inställd på låsnivå 0 (LN0). För ändring av låsnivå, se B.


1. STOPPAD ska visas i fönstret. För att stoppa pumpen, tryck **STOP/START** i 3 sek.
2. Tryck **MORGONDOS** - Låsnivå 0 (LN0) visas.
3. Tryck **MORGONDOS** - Kod 0 visas.
4. Tryck på pilknappen tills Kod 114 visas.
5. Tryck **ENTER/RADERA**.
6. Tryck **NÄSTA** tills morgondosens spärrtid visas.
7. Tryck **ENTER/RADERA**. Spärrtiden är upplåst.
8. Tryck **STOP/START** i 3 sek.
9. Tryck **MORGONDOS** - morgondosen visas.
10. Tryck på pilknappen tills önskad dos visas.
11. Tryck **ENTER/RADERA** - för att bekräfta den nya morgondosen.
12. Tryck lätt på **STOP/START** -  
Igång visas i fönstret.

Vid behov att åter låsa pumpen, se B.

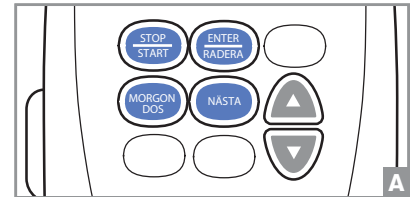

## B. Ändring av låsnivå

1. STOPPAD ska visas i fönstret. För att stoppa pumpen, tryck **STOP/START** i 3 sek.
2. Tryck **MORGONDOS** - aktuell låsnivå visas (LN0, LN1 eller LN2).
3. Tryck på pilknappen tills önskad låsnivå visas.
4. Tryck **ENTER/RADERA** - Kod 0 visas.
5. Tryck på pilknappen tills Kod 14 visas.
6. Tryck **ENTER/RADERA** - för att bekräfta låsnivån.
7. Tryck **STOP/START** i 3 sek.  
Igång visas i fönstret.

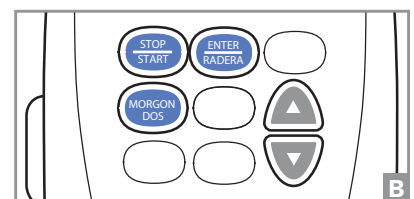

**OBS! MORGONDOSEN ÄR UPPLÅST. PATIENTEN MÅSTE INFORMERAS, SÅ ATT MAN EJ AV MISSTAG GER EN EXTRA MORGONDOS.**

**Duodopa Support: 020-506050**