


Subkutan injeksjon av Metex[®] penn


- forhåndsfylt injeksjonspenn

1. Injeksjonssteder

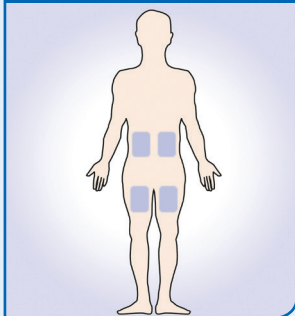


- **Injeksjonssteder:** Mage (ikke rundt navlen) eller lårene.
- Vask hendene og bruk den medfølgende alkoholservietten til å desinfisere det valgte injeksjonssted.

2. Trekk av hetten

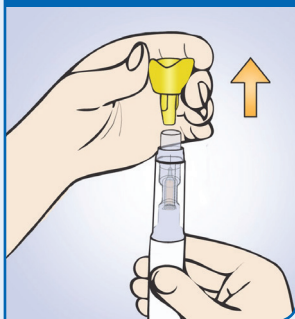


- Trekk av den gule hetten ved å bevege den rett oppover. Ikke skru!

3. Lag en hudfold

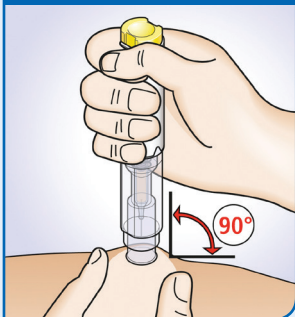


- Lag en forsiktig en hudfold ved å klemme sammen det rengjorte hudområdet mellom tommel og pekefinger.
- Plasser pennen på huden i 90 graders vinkel.

4. Låse opp

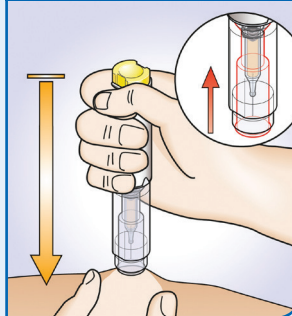


- Trykk pennen forsiktig mot huden (slik at nålbeskyttelsen trykkes helt inn) for å låse opp avtrekkeren.
- Hold pennen fast mot huden.

5. Injisér

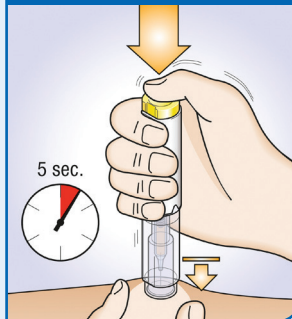

- Trykk på avtrekkeren for å starte injeksjonen.
- Du hører et klikk som angir starten på injeksjonen.
- Hold pennen i ca. 5 sekunder, til all væske er injisert.

6. Fjern

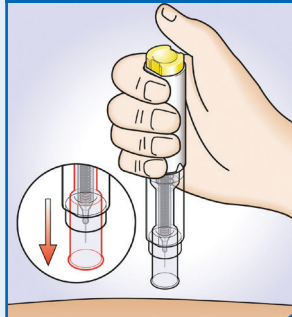

- Så snart det ikke er mer væske i pennen, kan du slippe huden og løfte pennen fra huden.
- Nålbeskyttelsen glir automatisk over nålen og låses på plass.