


SoloSTAR

SNABBGUIDE

Du har just blivit ordinerad Suliqua (insulin glargin + lixisenatid) i den förfyllda injektionspennan SoloSTAR. I snabbguiden hittar du information om hur du använder din SoloSTAR. Utförligare information finner du i den bruksanvisning som följer med SoloSTAR-förpackningen. Du kan även ringa 020-52 68 87 och få svar på dina frågor om diabetesprodukterna från Sanofi.

Suliqua och dess delar

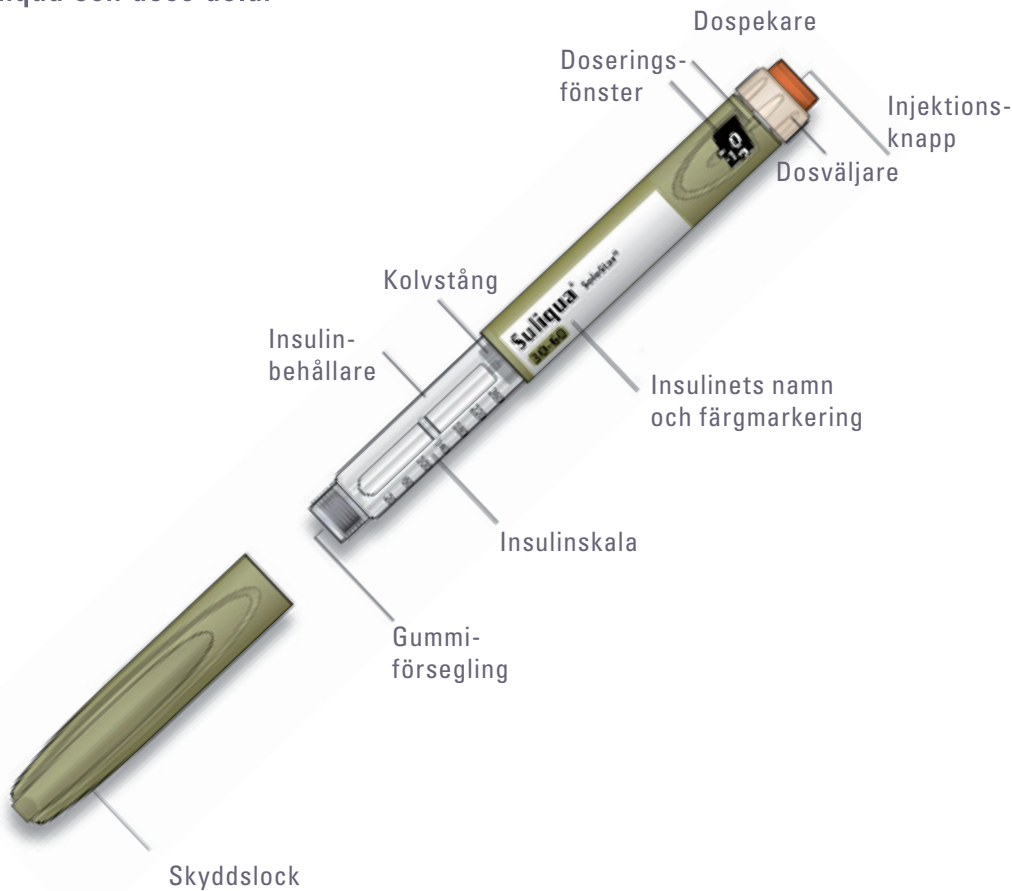


Varje SoloSTAR innehåller 60 enheter insulin.

Så börjar du med Suliqua

- 1** Kontrollera att du har rätt läkemedel. Suliqua är en olivfärgad penna med en brun injektionsknapp.




- 2** Tag av skyddslocket och kontrollera att insulinet är genomskinligt.

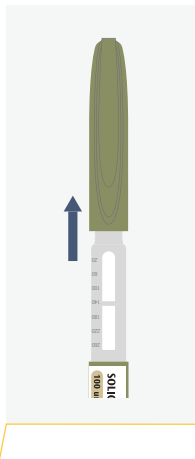

Sätt fast nålen

- 3** Sätt på en ny nål rakt på gummiförseglingen. Skruva eller tryck på nålen beroende på vilken nål du använder.

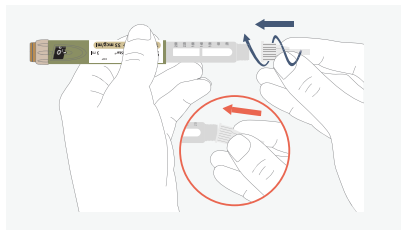


OBS!

Ställ inte in dos eller tryck på injektionsknappen utan att nålen är fastsatt.


Gör ett säkerhetstest

4 Välj en dos om 2 enheter genom att vrida dosväljaren medsols. Tag av yttre och inre nålskyddet.

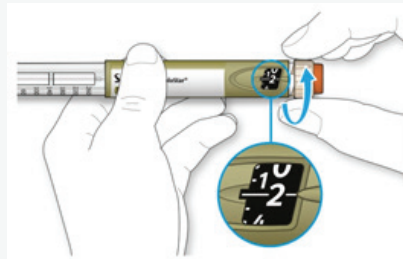


5 Håll pennen med nålen uppåt. Tag bort eventuella luftbubblor genom att knäppa med fingret på insulin-behållaren.

6 Tryck in injektionsknappen hela vägen in. Kontrollera att insulin kommer ur nålspetsen och att dosfönstret visar "0".

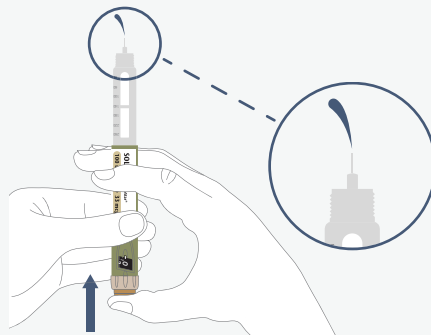


Ställ in dosen och injicera


7 Ställ in din valda dos. Vrid du förbi den enhet du skall injicera, är det bara att vrida tillbaka till rätt enhet.

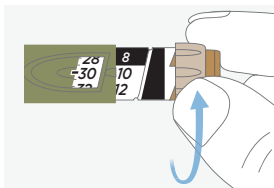

Q Håll kvar trycket på injektionsknappen i nedtryckt läge medan du räknar till 10. Drag därefter ur nålen.

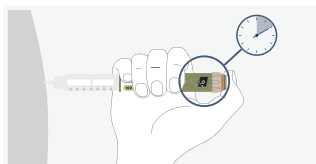


0 Injicera din dos så som din diabetes-sköterska eller läkare har lärt dig. Stick in nålen i huden och tryck in injektionsknappen ända ner till botten. Under tiden du injicerar räknar dosfönstret ner till "0".

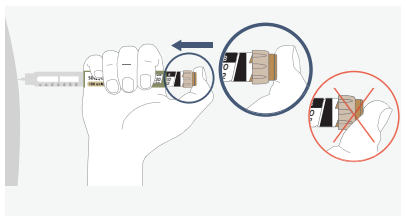

OBS!

Avlägsna alltid nålen efter en injektion och förvara SoloSTAR utan nål. Detta hjälper till att förebygga nedsmutsning, luftbubblor och insulinläckage.

10 Sätt på det yttre nålskyddet och skruva av nålen. Kasta nålen som du har blivit anvisad. Du undviker stickskador genom att inte använda det inre nålskyddet. Sätt på skyddslocket på din SoloSTAR och förvara den säkert.

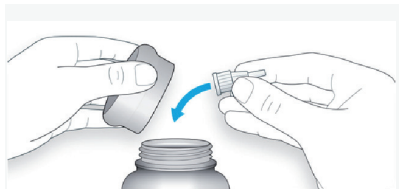

Hur pennan ska förvaras

Före första användning

- Förvara nya pennor i kylskåp, vid **2°C till 8°C**.
- **Får ej** frysas.

Efter första användning

- Förvara pennan i rumstemperatur, vid **högst 25°C**.
- **Lägg inte** tillbaka pennan i kylskåp.
- **Förvara inte** pennan med nålen fastsatt.
- Förvara pennan med skyddslocket på.
- Använd pennan i **högst 28 dagar** efter första användning.

Hur du ska sköta din penna

Hantera pennan med omsorg

- Om du tror att din penna kan vara skadad, så **försök inte** laga den. Använd en ny penna.

Skydda din penna från damm och smuts

- Du kan rengöra utsidan av pennan genom att torka av den med en fuktig trasa (endast vatten). Blötlägg, tvätta eller smörj inte in pennan. Detta kan skada den.

Kassering av pennan

- Avlägsna nålen innan du kasserar pennan.
- Kassera pennan enligt gällande rutiner.

Har du frågor om din SoloSTAR ring oss gärna på vår servicetelefon 020-52 68 87.



Suliqua® (insulin glargin + lixisenatid) R, F, A10AE54, 100 enheter/ml + 50 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna respektive 100 enheter/ml + 33 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna. **Indikation:** Suliqua är avsett för, i kombination med metformin, behandling av vuxna med diabetes typ 2 för att förbättra den glykemiska kontrollen när tillräcklig kontroll inte uppnått med metformin enbart eller i kombination med ett annat peroralt glukossänkande läkemedel eller basinsulin. **Varning och försiktighet:** Suliqua ska inte användas hos patienter med diabetes mellitus typ 1 eller vid behandling av diabetesketoacidosis. För ytterligare information se www.fass.se. **Förpackningar:** Suliqua SoloStar 3x3 ml pennor samt 5x3 ml pennor. Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén, september 2017 Subventioneras endast för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se



Frågor om våra diabetesprodukter:
020-52 68 87

Mer information om diabetes hittar du på www.insulin.se

Du kan också läsa om olika insuliner på www.fass.se

Läs bipacksedeln noggrant!



Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm. Tel 08-634 50 00. www.sanofi.se

Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com