


D-mine® Pump

Quickguide til patienter




Start af lægemiddelinfusion

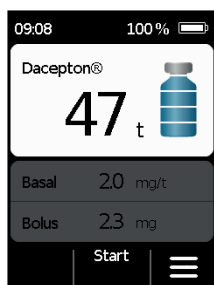

- Træk medicinen op efter særskilt instruktion og sæt infusionsnålen på huden et passende sted.
- Tryk på **Start** på hovedskærmen. Hold knappen nede (i ca. 3 sekunder), indtil du hører en signaltone, og slip først derefter knappen.


Stop af lægemiddelinfusion

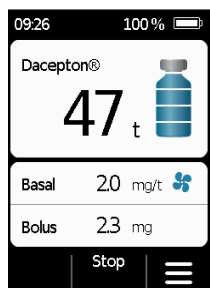

- Tryk på **Stop** på hovedskærmen. Hold knappen nede (i ca. 3 sekunder), indtil du hører en signaltone, og slip først derefter knappen.

Hvis beholderen er tom eller næsten tom følges punkt 1, 2 og 3.

Hvis der stadig er medicin i beholderen, som du skal bruge næste dag, så kobl pumpen fra kroppen og følg punkt 3.

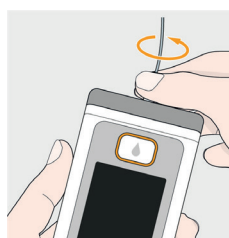

1. Fjern det brugte infusionssæt fra din krop og fra beholderen.




2. Tryk på oplåsningsknappen på pumpen, og træk den brugte beholder ud af apparatet. Bortskaf den efter gældende retningslinjer.

3. Anbring pumpen i dockingstationen. Apparatet tænder for skærmen og bekræfter med en tone, at batteriet i pumpen oplades. På skærmen ændres batterisymbolet, og signallyset på dockingstationen lyser gult. Husk at skifte mellem de 2 batterier.


Infusion af bolus



Tryk på bolusknappen, og hold den nede.

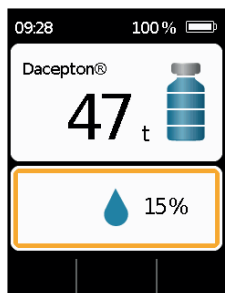

Hold knappen nede (i ca. 3 sek.), indtil det akustiske signal «OK» lyder, og slip derefter knappen igen. Pumpen injicerer nu den indstillede bolusmængde. Pumpen viser forløbet for infusionen i procent.

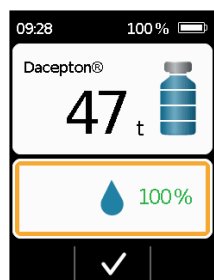

Pumpen melder afslutningen ved at vise 100 % og udsende signaltonen «Færdig». Tryk på **Flueben** for at gå tilbage til hovedskærmen.

Følgende sammenfatning er ikke et alternativ til informationen i brugsansvisningen, men en kort grundlæggende sammenfatning af pumpens funktioner