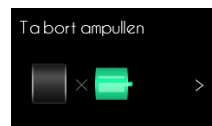


SNABBGUIDE för patient

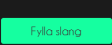
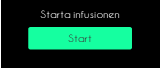


AVBRYT INFUSIONEN

- Tryck på  och håll intryckt
- Tryck på avsluta infusionen och håll intryckt. Bekräfta med grön bock
- Kolvstängan dras tillbaka
- Koppla bort ampullen genom att vrida den ett kvarts varv åt höger (motsols).
- Tryck sedan på > knappen
- Ta ut batteriet och sätt det på laddning, stoppa i ett nyladdat batteri



STARTA NY INFUSION

- Dra upp läkemedel enligt instruktion och sätt infusionskanyl på lämpligt ställe.
- Slå på pumpen.
- Tryck på Ny infusion.
- Tryck flera gånger på > knappen tills du hör ett surrande ljud (pumpen förbereder för infusion).
- Sätt på ampullen på pumpen och tryck på > knappen.
- Fyll slangen genom att trycka på  knappen och håll den intryckt tills du ser att det kommer läkemedel ut ur slangen. Tryck sedan på > knappen.
- Starta infusionen genom att trycka på 

Knapp ON/OFF



TA EN BOLUSDOS

- Tryck på  och håll intryckt.

PAUSA INFUSIONEN

- Tryck på  och håll intryckt.
- Tryck på Paus och håll intryckt.

STARTA INFUSIONEN

- Tryck på  och håll intryckt.
- Tryck på fortsätt infusion och håll intryckt.

Följande sammanfattning är inte ett alternativ till informationen i manualen utan endast en kort grundläggande sammanfattning av pumpens funktioner