

تعليمات المستخدم الخاصة بجهاز الاستنشاق RESPIMAT®

للاستخدام اليومي

لا تحتاج إلى استخدام جهاز الاستنشاق هذا إلا مرة واحدة في اليوم.
وفي كل مرة تستخدمه فيها، تناول نفثتين.

1. الفتح

- حافظ على الغطاء مغلقاً
- لف القاعدة الشفافة في الاتجاه الذي تحدده الأسهم الموجودة على الملصق حتى تسمع صوت نقرة (نصف لفة)



2. الفتح

- افتح الغطاء بالكامل



3. الضغط

- خذ أنفاساً بطيئة وكاملة خارج الجهاز، ثم ضم شفاهك حول الجزء الفموي
- تنفس داخل الجهاز ببطء وعمق من خلال فمك واضغط على زر إطلاق الجرعة. حافظ على التنفس ببطء
- كرر اللف، الفتح، الضغط للنفثتين بالكامل



ناتشفن
يف صح او قرم
مويلا

متى يجب استبدال الخرطوشة أو جهاز الاستنشاق

يوضح مؤشر الجرعات عدد النفثات المتبقية في الخرطوشة.



الخرطوشة فارغة. قم باللف لإزالة القاعدة الشفافة.
ثم اسحب الخرطوشة خارج جهاز الاستنشاق. وأدخل
الخرطوشة الجديدة.



المتبقي أقل من 10 نفثات.
احصل على خرطوشة
جديدة.



عدد النفثات المتبقية 60.

بمجرد استخدام ست خرطوشات في جهاز الاستنشاق، فيجب الحصول على عبوة جديدة من جهاز الاستنشاق Respimat®.



2

إدخال الخرطوشة

- أدخل الخرطوشة في جهاز الاستنشاق
- ضع جهاز الاستنشاق على سطح ثابت وادفع إلى الأسفل حتى تستقر الخرطوشة في مكانها



1

إزالة القاعدة الشفافة

- حافظ على الغطاء مغلقاً
- اضغط على مزلاج الأمان مع سحب القاعدة الشفافة باليد الأخرى



4

اللف

- حافظ على الغطاء مغلقاً
- لف القاعدة الشفافة في الاتجاه الذي تحدده الأسهم الموجودة على الملصق حتى تسمع صوت نفرة (نصف لفة)



3

عمل ملاحظات للخرطوشة

- عَلم على مربع التحديد الموجود على ملصق جهاز الاستنشاق لتتبع عدد الخرطوشات
- ادفع القاعدة الشفافة مرة أخرى في مكانها حتى تسمع نفرة



5

الفتح

- افتح الغطاء بالكامل



6

الضغط

- وجّه جهاز الاستنشاق إلى الأسفل نحو الأرض
- اضغط على زر إطلاق الجرعة
- أغلق الغطاء
- كرر الخطوات من 4 إلى 6 حتى يصبح الرذاذ مرئياً
- ثم كرر الخطوات من 4 إلى 6 ثلاث مرات أخرى
- أصبح جهاز الاستنشاق جاهزاً الآن للاستخدام ويحتوي على 60 نفثة (30 جرعة)