


D-mine[®] pumpe

Hurtigguide til pasient

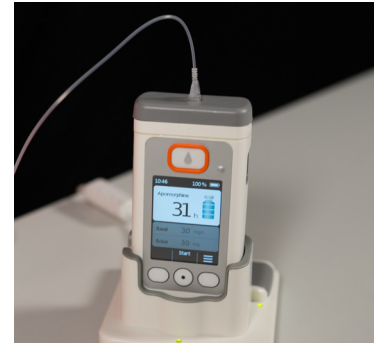


Slik starter du infusjonen



Trekk opp medisin i henhold til egen bruksanvisning, sett infusjonsnålen på et passende sted og koble til infusjonssettet.


Trykk på Start, hold knappen nede i ca 3 sekunder til du hører en signaltone. Slipp deretter knappen.

Slik gir du en bolusdose

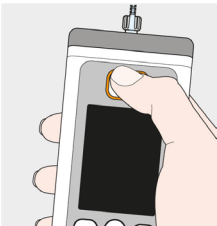

Trykk på bolusknappen med bilde av en dråpe. Hold knappen nede i ca 3 sekunder til du hører en signaltone. Slipp deretter knappen.

Pumpen gir deg nå en bolusdose.

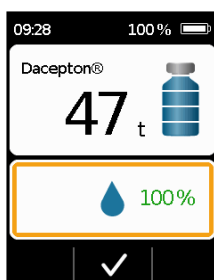

Når bolusdosen er gitt, kan du høre en signaltone. Skjermbildet vil nå vise 100%.

Trykk på **Haken** for å gå tilbake til hovedskjermen.

Slik stopper du infusjonen



Trykk på Stopp, hold knappen nede i ca 3 sekunder til du hører en signaltone. Slipp deretter knappen.

Hvis beholderen er tom eller nesten tom, følges punkt 1, 2 og 3 under.

Er det fremdeles medisin i beholderen som du skal bruke neste dag, koble fra det brukte infusjonssettet, og følg punkt 3.

Husk å bytte infusjonssett hver dag for å unngå hudreaksjoner.



1. Koble fra det brukte infusjonssettet.
2. Trykk inn den grå knappen på høyre side av pumpen, og trekk den brukte beholderen ut av pumpen. Kasser den etter gjeldende retningslinjer.
3. Plasser pumpen i dockingstasjonen. Pumpens skjerm vil da lyse, og du vil høre en signaltone. Dette betyr at batteriet i pumpen lades opp. På skjermen endres batterisymbolet, og signallyset på dockingstasjonen lyser gult.

Husk å starte hver infusjon med et oppladet batteri.

Denne hurtigguiden er ikke et alternativ til informasjonen i bruksanvisningen, men kun en sammenfatning av noen av pumpens funksjoner