

Till dig som fått Mounjaro® KwikPen® förskrivet

Mounjaro® KwikPen®
(tirzepatid)
Injektionsvätska, lösning



Eli Lilly Sweden AB
Gustav III:s boulevard 42
Box 721, SE-169 27 Solna
Tel +46 (0)8 737 88 00
www.lilly.com/se


Nu finns en modifierad version av Mounjaro KwikPen®

Från januari 2026 har en modifierad version av Mounjaro KwikPen distribuerats till apotek. Ursprunglig Mounjaro Kwikpen kommer i samtliga doser gradvis under första halvan av 2026 ersättas av modifierad Mounjaro Kwikpen. Precis som tidigare innehåller pennan den läkemedelsvolym som behövs för 4 doser inklusive flödeskontroll. Pennan har modifierats för att minska volymen av kvarvarande läkemedel. Detta gör det tydligare att se när sista dosen är administrerad, vilket underlättar att veta när pennan är förbrukad och ska kasseras. Därigenom förbättras den medicinska säkerheten relaterad till icke korrekt användning av injektionspennan.


Pennan fungerar på samma sätt som den ursprungliga versionen av Mounjaro KwikPen, men det finns några uppdateringar:

1. **Kolvens position:** Kolven är placerad längre ner i ampullen jämfört med tidigare version.
2. **Förlängd kolv:** En ny del/komponent (se figur) har lagts till bakom kolven, vilket gör den längre.
3. **Kvarvarande läkemedel:** Efter den fjärde dosen har administrerats kommer kolven att vara nära botten på ampullen, vilket tydligt indikerar att pennan är redo att kasseras.

Kolvens placering - oanvänd KwikPen®-injektionspenna

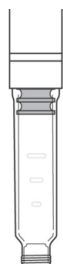


Ursprunglig KwikPen®

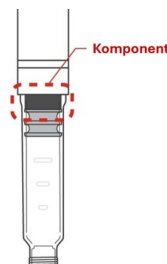


Modifierad KwikPen®

Kolvens ungefärliga position efter 4e dosen

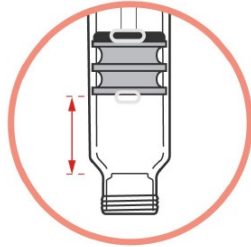

Ursprunglig KwikPen®

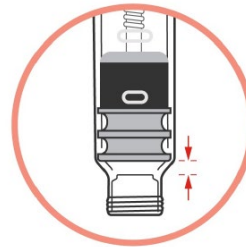

Modifierad KwikPen®

Positionen av kolven är relativ beroende på antal gjorda flödeskontroller.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta oss via Lilly Medicinsk Information via e-post scan_medinfo@lilly.com eller telefonnummer 08-737 88 00.

Med vänliga hälsningar
Lilly