

تعليمات استعمال جهاز الاستنشاق ريسبيمات® RESPIMAT

الاستعمال اليومي

تحتاج إلى استخدام جهاز الاستنشاق هذا مرة واحدة في اليوم، بمعدل رشتين في الجرعة.



3. الضغط

- قم بقبل شفطيك حول الميسم بدون تغطية فتحات التهوية. فهذه الفتحات تضمن لك إمكانية التنفس شهيقاً وزفيراً من خلال جهاز الاستنشاق حتى تكون مستعداً لاستنشاق رشة الدواء.
- عندما تكون مستعداً لاستنشاق الدواء، خذ نفساً عميقاً ببطء، ثم اضغط على زر إطلاق الجرعة، مع الاستمرار في التنفس ببطء لأطول مدة يمكنك فيها ذلك بدون إجهاد. ثم احبس أنفاسك لمدة 10 ثوانٍ أو لأطول مدة يمكنك فيها فعل ذلك بدون إجهاد.
- كرر الخطوات: **التدوير، والفتح، والضغط**، في كل مرة لتحصل على رشتي الدواء.



2. الفتح

- افتح الغطاء حتى ينفصل عن الجهاز.



1. التدوير

- أبقِ الغطاء مغلقاً كما هو.
- قم بتدوير القاعدة الشفافة باتجاه الأسهم المبينة على الملصق حتى تُصدر صوتاً (التدوير لنصف دائرة).

موعد تغيير الخرطوشة أو جهاز الاستنشاق® RESPIMAT

مؤشر الجرعات يوضح عدد الرشرات المتبقية في الخرطوشة.



لقد نفذت الخرطوشة. قم بتدوير جهاز الاستنشاق بعد استنشاق آخر جرعة، حتى تنفتح القاعدة تلقائياً. ثم اسحب الخرطوشة من داخل الجهاز، وأدخل خرطوشة جديدة مكانها.



أقل من 10 رشرات متبقية. يُرجى إعداد خرطوشة جديدة.



60 رشرة متبقية.

يُستخدم الجهاز لاستنشاق ثلاث خرطوشات، و عليك بعدها شراء عبوة ريسبيمات® RespiMat جديدة بها جهاز استنشاق.



2

إدخال الخرطوشة

- أدخل الخرطوشة في جهاز الاستنشاق.
- ضع الجهاز على سطح ثابت، واضغط عليه حتى تسمع صوت تثبيت الخرطوشة في مكانها الصحيح.



1

إزالة القاعدة الشفافة

- أبقِ الغطاء مغلقًا كما هو.
- اضغط قفل الأمان بإحدى يديك، مع سحب القاعدة الشفافة باليد الأخرى.



4

التدوير

- أبقِ الغطاء مغلقًا كما هو.
- قم بتدوير القاعدة الشفافة باتجاه الأسهم المبنية على الملصق حتى تُصدر صوتًا (التدوير لنصف دائرة).



3

ضع القاعدة الشفافة في مكانها الصحيح.

- ضع القاعدة الشفافة حتى تسمع صوت تثبيتها في مكانها الصحيح.



6

الضغط

- قم بتوجيه فتحة جهاز الاستنشاق إلى الأسفل.
- اضغط على زر إطلاق الجرعة.
- أغلق الغطاء.
- كرر الخطوات 4-6 حتى ترى الدواء يخرج على هيئة دخان.
- ثم كرر الخطوات 4-6 لثلاث مرات.
- جهاز الاستنشاق الآن جاهز للاستعمال لاستنشاق 60 رشة من الدواء (30 جرعة).



5

الفتح

- افتح الغطاء حتى ينفصل عن الجهاز.