

دستورالعمل استنشاق افشانه RESPIMAT®

استفاده روزانه

یکبار در روز، از این افشانه استفاده کنید. در هر بار مصرف، دو پاف استفاده کنید



3. فشار دادن

- لب‌های خود را بدون پوشاندن حفره‌های هوا، دور دهان-گیر ببندید. این حفره‌ها بدن معنی است که شما می‌توانید تا آماده شدن برای انجام پاف به داخل یا خارج افشانه بدمید.
- زمانی که آماده شدید، یک نفس آرام و عمیق از طریق دهان بکشید، دکمه رهایش دوز را **فشار دهید** و تا زمان کسب احساس راحتی، به آرامی به تنفس ادامه دهید.
- سپس به مدت 10 ثانیه یا تا زمان کسب احساس راحتی، نفس خود را حبس کنید.
- مراحل **چرخاندن**، **باز کردن**، **فشاردن** را برای 2 پاف تکرار کنید.



2. باز کردن

- درپوش را تا زمان چفت شدن به طور کامل باز کنید.



1. چرخاندن

- درپوش را بسته نگه دارید.
- تا زمان کلیک (نیم دور)، پایه شفاف را در جهت فلش‌های روی برجسب بچرخانید.

زمان تعویض کارتریج RESPIMAT® یا افشانه

نشانه‌گر دوز، تعداد پاف‌های باقیمانده در کارتریج را نشان می‌دهد.



کارتریج استفاده شده است. زمانی که افشانه را بعد از مصرف آخرین دوز می‌چرخانید، پایه به طور خودکار شل می‌شود. کارتریج را از داخل افشانه بیرون بکشید. کارتریج جدید را وارد کنید.



کمتر از 10 پاف باقیمانده است. کارتریج جدید تهیه کنید.



60 پاف باقی مانده است.

هنگام استفاده از افشانه دارای سه کارتریج، یک بسته Respimat® جدید حاوی یک افشانه دریافت کنید.



2

وارد کردن کارتریج

- کارتریج را وارد افشانه کنید.
- افشانه را روی سطحی ثابت قرار دهید و تا زمان شنیدن صدای کلیک، آنرا به سمت پایین فشار دهید.



1

پایه شفاف را جدا کنید

- درپوش را بسته نگه دارید.
- هنگام بیرون کشیدن پایه شفاف با دست خود، دستگیره ایمنی را فشار دهید.



4

چرخاندن

- درپوش را بسته نگه دارید.
- تا زمان شنیدن صدای کلیک (تیم دور) پایه شفاف را در جهت فلشهای روی برچسب، بچرخانید.



3

پایه شفاف را به جای خود برگردانید

- تا شنیدن صدای کلیک پایه شفاف را به جای خود برگردانید



6

فشار دادن

- افشانه را به سمت زمین بگیرید.
- دکمه رهایش دوز را فشار دهید.
- درپوش را ببندید.
- مراحل 4-6 را تا زمان مشاهده ابر تکرار کنید.
- سپس مراحل 4-6 را سه بار دیگر تکرار کنید.
- افشانه شما اکنون آماده استفاده است و دارای 60 پاف می‌باشد (30 دوز).



5

باز کردن

- درپوش را تا زمان باز شدن کامل چفت‌ها باز کنید