

# INSTRUCCIONES DE INHALACIÓN CON EL INHALADOR RESPIMAT®

## USO DIARIO

Solo necesitará utilizar este inhalador **una vez al día**. Deberá realizar **dos descargas** cada vez que lo utilice.



### 1. GIRAR

- Mantenga la tapa cerrada.
- **GIRE** la base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta).



### 2. ABRIR

- **ABRA** completamente la tapa.



### 3. PRESIONAR

- Cierre los labios alrededor de la boquilla sin cubrir los orificios de ventilación. Dichos orificios le permiten inspirar y espirar a través del inhalador hasta que esté preparado para tomar una descarga.
- Cuando esté listo, inspire lenta y profundamente a través de la boca, **PRESIONE** el botón de liberación de dosis y siga respirando lentamente tanto tiempo como sea posible. A continuación, mantenga la respiración durante 10 segundos o todo el tiempo que pueda.
- Repita los pasos de **GIRAR**, **ABRIR** y **PRESIONAR** para dos descargas en total.

## CUÁNDO CAMBIAR EL CARTUCHO DE RESPIMAT O EL INHALADOR

El indicador de dosis muestra cuántas descargas quedan en el cartucho.



Quedan 60 descargas



Quedan menos de 10 descargas. Compre un cartucho nuevo.



El cartucho se ha agotado. La base se aflojará automáticamente al girar el inhalador después de tomar la última dosis. Extraiga el cartucho del inhalador e introduzca uno nuevo.

Cuando haya utilizado el inhalador con tres cartuchos, compre un paquete Respimat nuevo que incluya un inhalador.

## PREPARACIÓN PARA SU USO



### Retirar la base transparente

- Mantenga la tapa cerrada.
- Presione el cierre de seguridad mientras extrae la base transparente con la otra mano.



### Introducir cartucho

- Introduzca el cartucho en el inhalador.
- Coloque el inhalador sobre una superficie firme y empuje hasta que encaje haciendo clic.



### Volver a colocar la base transparente en su sitio

- Vuelva a colocar la base transparente hasta que haga clic.



### GIRAR

- Mantenga la tapa cerrada.
- Gire la base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta).



### ABRIR

- Abra completamente la tapa.



### PRESIONAR

- Dirija el inhalador hacia el suelo.
- Presione el botón de liberación de dosis.
- Cierre la tapa.
- Repita los pasos 4 a 6 hasta que se observe una nube.
- A continuación, repita los pasos 4 a 6 tres veces más.
- El inhalador ya estará listo para su uso y proporcionará 60 descargas (30 dosis)